



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ «ВЕКТОР»

1 ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОДОВ

Смочить все многоразовые фланелевые прокладки теплой водой и отжать.



Теплая вода

2 ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Ввести шприцом во флакон «Карипайн плюс сухой бальзам» 10 мл. «Физраствор» комнатной температуры.



Карипайн плюс сухой бальзам

Физраствор 10 мл.

3 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД


Открыть колпачок флакона «Карипайн плюс сухой бальзам» и добавить в него пипеткой две капли «Димексид» или шприцом 0,5 мл. После чего вылить подготовленную субстанцию на одну из фланелевых прокладок.




Димексид

Карипайн плюс сухой бальзам

6 Подсоединить блок питания к прибору. (батарейка «Крона» должна отсутствовать)

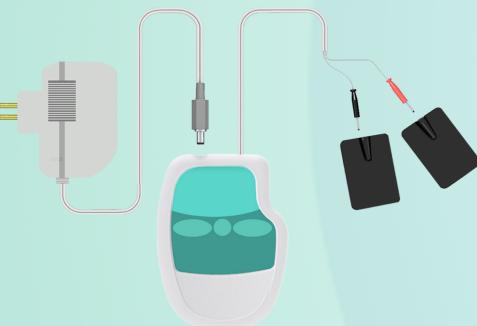


5 Расположить подготовленные прокладки на теле пациента в соответствии со схемой.

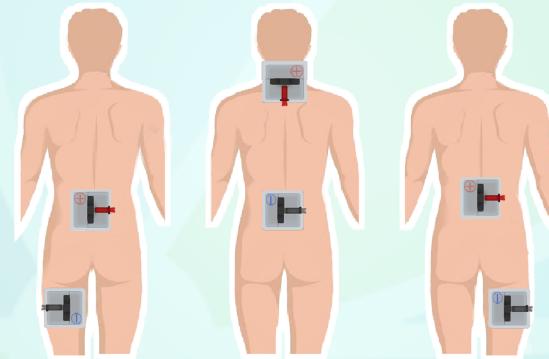


4 НАНЕСЕНИЕ ЭУФИЛЛИНА НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Нанести шприцом на фланелевые прокладки по 5 мл. «Эуфиллин» 2.4 % на отрицательный электрод.

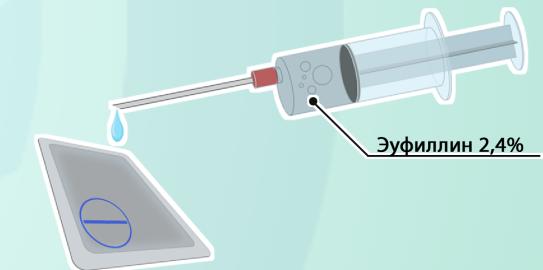


Эуфиллин 2,4%

7 Подсоединить подключенные провода к резиновым электродам при помощи штекера.

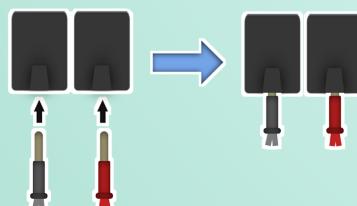

8 Вставить провода в технический разрез прокладок, соблюдая полярность. Красный провод в одну прокладку с раствором «Карипайн плюс сухой бальзам» и чёрный провод в другую прокладку с раствором «Эуфиллин».

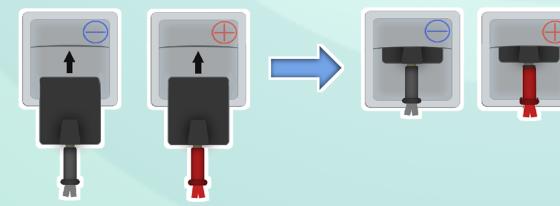

9 Положить прижимной физиотерапевтический мешок на прокладки с электродами для лучшего соприкосновения с телом пациента.



10 Нажать кнопку «Старт». Установить таймер процедуры на 20 минут. Регулятором тока выставить значение в диапазоне от 0,5 mA до 10 mA. в зависимости от ощущений пациента. Повышать ток необходимо плавно, опираясь исключительно на ощущения пациента. (повышать ток до легкого покалывания)



Сила тока 0,5-10. мА.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 КУПИТЬ В АПТЕКЕ РАСХОДНИКИ

Для проведения курса процедур лекарственного электрофореза с помощью набора «Вектор» необходимо дополнительно приобрести в аптеке: «Физраствор» (натрия хлорид) – 20 ампул по 10 мл., «Димексид» – 1 флакон, «Эуфиллин» 2,4% – 2 упаковки по 10 ампул., Пипетка – 1 шт., Шприц 10 мл. – 20 шт. В случае отсутствия «Эуфиллина», вместо него допускается использование 10 мл. «Физраствор». В случае отсутствия «Димексид» - можно исключить его из процедуры. Использовать дистиллированную воду вместо физраствора нельзя. (она не проводит ток)

2 КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Лечение состоит из двух курсов. Курс лечения включает в себя 20 процедур лекарственного электрофореза «Карипайн плюс сухой бальзам» в сочетании с аппликациями «Карипайн ультра гель» с перерывом в 1 месяц после 20-ой процедуры. Ремиссия 3-4 года. Процедуры выполняются систематически (ежедневно) без пропуска. Для удобства рекомендуется использовать Дневник пациента. На протяжении всего курса лечения противопоказаны сильные физические нагрузки.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Процедуры электрофореза желательно проводить вечером за 1-2 часа до сна. После процедуры электрофореза необходимо протереть кожу водно-спиртовым раствором или влажной гигиенической салфеткой. Нанести массирующим движением 2-3 г. «Карипайн ультра гель» на зону, где располагалась прокладка с «Карипайн плюс сухой бальзам», после чего отдохнуть 10-15 минут в расслабленном состоянии под одеялом. Утром необходимо также нанести 2-3 г. «Карипайн ультра гель». На случай пропуска процедур электрофореза необходимо продолжать лечение «Карипайн ультра гель». 2 раза в день. (утром и вечером)

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОРАЗОВЫХ ПРОКЛАДОК

Многоразовые фланелевые прокладки должны плотно прилегать к телу пациента, это поможет исключить точечный контакт, в области которого может появиться микроожог. Для прижима многоразовой фланелевой прокладки используется физиотерапевтический мешок. Наполнителем для физиотерапевтического мешка в домашних условиях может служить 200 грамм крупы (рис, гречка). После проведения процедуры лекарственного электрофореза необходимо промыть многоразовые фланелевые прокладки под проточной водой, выжать и высушить. При должном уходе они могут прослужить 3-4 года.

5 ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Любой аппарат для гальванизации и электрофореза работает при условии замкнутой электрической цепи. Для тестирования работоспособности необходимо включить аппарат в сеть 220 вольт (при включении в сеть 110 вольт аппарат работает некорректно. Необходимо дополнительно использовать специализированный трансформатор напряжения). Далее необходимо замкнуть между собой плюсовой и минусовой резиновый элекрод, после чего опустить их в стакан с водой. Если на электродах появятся пузырьки – аппарат исправен.

6 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергическая реакция (покраснение и зуд) на «Карипайн плюс сухой бальзам» встречается крайне редко (индивидуальная непереносимость ферментов в составе единична). Аллергическая реакция может возникать в следствии использования «Димексид» и «Физраствор». Для выяснения причины аллергической реакции исключите первым делом «Димексид». В случае если аллергическая реакция осталась, необходимо заменить «Физраствор» на фильтрованную проточную воду.



ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА



ФИЗИОСФЕРА
ВСЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ
8 (800) 444-41-48
www.fiziosfera.ru

Дата процедуры	Утро	Вечер	Вечер	Самочувствие
1)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
2)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
3)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
4)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
5)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
6)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
7)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
8)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
9)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
10)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	

Дата процедуры	Утро	Вечер	Вечер	Самочувствие
11)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
12)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
13)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
14)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
15)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
16)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
17)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
18)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
19)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	
20)	Аппликация	Электрофорез	Аппликация	



Видео инструкция:
<https://goo.gl/1ErKXq>

